

Bedienungsanleitung

LabMuse wp-1

Digitales Tauchwachsgerät, Ref: 400200

Beschreibung

Bei dem LabMuse WP-1 handelt es sich um ein Tauchgerät um Wachs zu schmelzen, welches in Dental Labors zum Einsatz kommt.

Modelle

wp-1: Tauchwachsgerät mit einem Topf

Funktionen

Startknopf

Stellt die Verbindung vom Gerät zum Stromkreis her

Einstellen der Temperatur

Gerät: wp-1

Mit Bedienen der Schalter ▲/▼ stellen Sie die Temperatur ein (30°C-130°C/86°F~266°F)

Halten Sie den Schalter 2-3 mal gedrückt. Die gewünschte Temperatur wird schnell erreicht. Während des Einstellens der Temperatur wird die jeweilige Temperatur für ca. 2 Sekunden angezeigt.

Anzeige Celsius & Fahrenheit

Drücken Sie den °C/°F Schalter für 2 Sekunden. Die gewünschte Temperatureinheit ändert sich automatisch.

Temperatur Anzeige

wp-1

Die Temperatur Anzeige blinkt, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht ist, blinkt die Anzeige nicht mehr.

Ein/Aus

Das Heizelement arbeitet, wenn die Temperatur durch drücken des Schalters ▲ angezeigt wird. Drücken Sie den Schalter ▼ sinkt die Temperatur auf 30°C/86°F und auf der Anzeige erscheint „Off“ (Aus). Das Heizelement schaltet aus.

Akustisches Signal

Beim Drücken der Schalter erscheint ein akustisches Signal, um die Eingabe sicherzustellen.

Sicherheitshinweise/Warnung

Bitte berühren Sie die Taucheinheit nicht, solange das Gerät in Gebrauch ist. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen. Ist das Gerät nicht in Gebrauch, schalten Sie es bitte aus.

Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.



Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn ein Kabel, ein Stecker oder ein Anschluss defekt ist. Dies könnte zu Verbrennungen oder einem elektrischen Schlag führen. Verbiegen Sie das Kabel nicht übermäßig und beschweren Sie das Gerät nicht unnötig. Beim Herausziehen des Kabels aus der Steckdose halten Sie bitte den Stecker fest. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Hitze ausströmenden Geräten wie z.B. Öfen, Kerzen etc. Bitte beachten Sie, dass das Gerät nur von Fachpersonal bedient wird. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern. Bei Verwendung einer Mehrfachsteckdose achten Sie bitte darauf, dass nicht zu viele elektrische Geräte gleichzeitig benutzt werden.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an: Eukamed e.K. , Cranachstraße 44, 42549 Velbert. Telefon: 02051-31 94 04, Fax: 02051-31 94 06, email: info@eukamed.de

Reinigung des Gerätes

Benutzen Sie ein weiches Tuch, um das Gerät von außen zu reinigen.

Eventuelle Wachsreste entfernen Sie, indem Sie das Wachs mit einem Föhn erwärmen und anschließend die Reste entfernen.

Bitte benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungen und vermeiden Sie Berührungen mit Wasser.

Spezifikation

Gerät	Stromquelle	AMP	Sicherung	Temperatur	Maße (mm)	Gewicht (Kg)
wp-1	AC220V 50/60 Hz	60VA	2A	30-130°C	140x100x70	0,39

Garantie

Wir gewähren 2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum).

Keine Gewährleistung wird übernommen bei:

- Auswahl der falschen Stromquelle
- Fallen lassen des Gerätes.
- Unsachgemäßem Gebrauch
- Ausfall nach Reparatur bei Nichtbeachtung von Bedienungsanweisungen seitens des Händlers

Hersteller

und Importeur



SAESHIN PRECISION CO.,LTD.
 HEAD OFFICE & FACTORY
 # 93-15,PAHO-DONG
 DALSEO-GU,KOREA
 Tel. 82-53-587-2340 / 2341
 Fax. 82-53-587-2347



EU representative
 Dongbang Acuprime
 Gater House,Gater Lane,Palace Gate,
 Exeter,EX 1 1JL. United Kingdom
 Tel. 44-1392-273908 Fax.44-1392-273909

SOM-L030S-KE Rev.0

www.saeshin.com / sales@saeshin.com

Stand 11.03.2010